



Mode d'emploi

Bottes pour sabot

SG3 / SG4 / SG5 / SG6 / SG7 / SG8

SG3-L / SG4-L / SG5-L / SG6-L / SG7-L / SG8-L

SG3-X / SG4-X / SG5-X / SG6-X / SG7-X / SG8-X

SG3-LX / SG4-LX / SG5-LX / SG6-LX / SG7-LX / SG8-LX



Mode d'emploi

Bottes pour sabot SG / SG-L / SG-X / SG-LX

Table des matières

Aperçu	2
Bottes pour sabot Modèle Standard / Modèle L	3
Instructions pour une utilisation correcte	3
Bottes pour sabot Modèle L	5
Remarques importantes	5
Remplacement de l'extension	6
Instructions pour la protection du paturon et des glomes	7
Astuces + Conseils	9
Trouver la bonne taille	12
Des questions ? Nous sommes là pour vous aider !	14



Aperçu


Bottes pour sabot

SG

SG-L

SG-X / SG-LX

Sangle du paturon

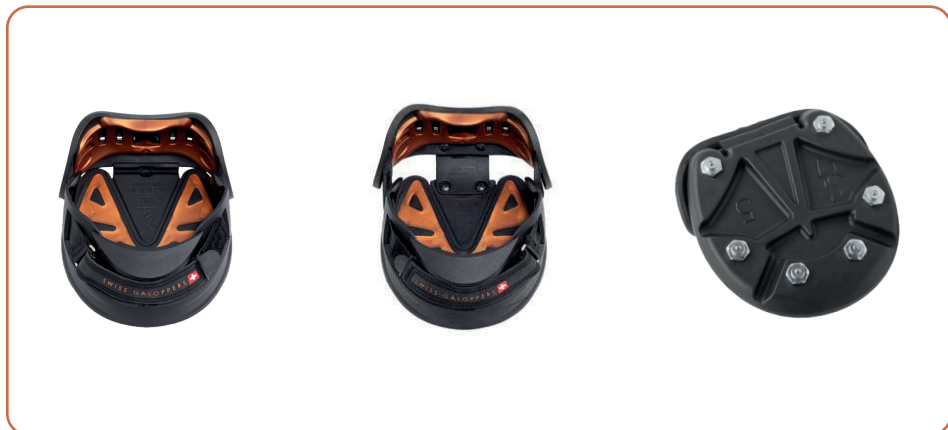

Rembourrage des glomes

Extensions (uniquement SG-L)

Sangle de fermeture



Instructions pour une utilisation correcte

Bottes pour sabot SG / SG-L



- 1 Avant la première utilisation, la lanière de cheville est fixée une fois à l'aide du velcro court à la fente intérieure de la coque de la balle.



- 2 Desserrez la sangle de fermeture et fixez le velcro sur le côté de la barre centrale.



- 3 Faites glisser l'hipposandale du bout vers l'arrière sur le sabot. La boucle de la sangle de fermeture doit être visible à l'extérieur.



- 4 Avec une légère tape sur l'avant de la hipposandale, assurez-vous que le sabot est bien avancé dans la chaussure. Veillez à ce que la chaussure soit droite. Pour les chevaux avec beaucoup de fanons, tirez les poils vers l'extérieur.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Instructions pour une utilisation correcte

Bottes pour sabot SG / SG-L



5

Déposez maintenant le sabot et contrôlez, en soulevant la coque de la plante du pied, que la chaussure est bien en place.



6

IMPORTANT ! Passez la sangle du paturon avant de serrer la sangle de fermeture. Pour ce faire, poussez légèrement la coque des glomes vers l'arrière.



7

Serrez fermement la sangle de fermeture et fermez la chaussure à l'avant, de manière à ce que la sangle s'ajuste proprement tout autour. En position finale, la boucle en métal se trouve directement devant le guide latéral de la sangle.



8

Fermez maintenant la sangle du paturon. Elle doit être bien ajustée, mais ne doit pas être (un doigt de large) trop serrée.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Remarque importante

Bottes pour sabot SG-L

i La version L est utilisée lorsque la chaussure standard ne couvre pas de manière optimale la longueur et/ou la hauteur du sabot, ce qui fait que la coque des glomes est trop basse ou mal positionnée.

Angle



Angle idéal



Angle trop plat


Ballenschale



Hauteur idéale du plateau de balles.



Plateau de balles trop haut.

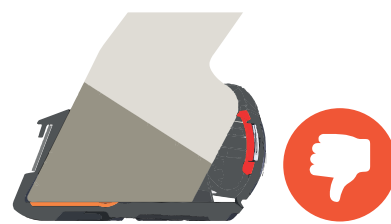

Plateau de balles trop bas.

i REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com


Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Remplacement de l'extension

Bottes pour sabot SG-L

Fixer l'étrier de maintien

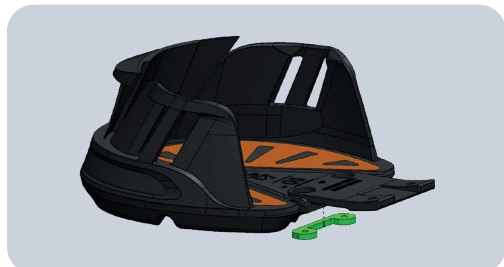

- 1 Insérer l'étrier de maintien avec filetage dans l'emplacement fraisé de la semelle.



- 2 Aligner l'étrier de maintien et le fixer avec deux vis par le dessus (c'est-à-dire depuis le côté opposé de la semelle).

i Remarque : L'étrier de maintien est déjà fileté – des écrous ne sont donc pas nécessaires.

Fixer la coque postérieure



- 3 Faire d'abord passer les vis à travers la plaque de renfort. Ensuite, insérer les vis dans les trous de fixation correspondants de la coque postérieure.



- 4 Visser les écrous sur les vis depuis l'arrière et les serrer afin que la coque postérieure soit solidement fixée à la rallonge.

i Important pour l'entretien : Vérifier régulièrement les vis et les resserrer si nécessaire, afin de garantir une connexion sûre et stable dans la durée.

i REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Instructions pour la protection du paturon et des glomes



- 1 Les plis sensibles du paturon sont protégés de manière optimale par la protection du paturon. Celle-ci agit de manière préventive contre les frottements dans cette zone.



- 2 La protection des glomes offre une protection supplémentaire pour les chevaux ayant des glomes délicats et sensibles. Elle protège de manière optimale les glomes ainsi que le pli du paturon.



- 3 Ouvrez la sangle de fermeture et desserrez-la afin que deux boucles puissent être retirées à côté de la barre centrale arrière.



- 4 Prenez la protection des glomes/paturon et tenez-la de manière à ce que les ailes en velcro puissent être passées à travers les fentes de la coque de la balle. Passez les ailes en velcro à travers les fentes et fermez-les à l'arrière.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com


Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Instructions pour la protection du paturon et des glomes

**5**

Les ailes de velcro fermées doivent être bien appliquées contre la partie de la balle. Une fois les deux côtés enfilés et fermés, remplacez la sangle de fermeture dans sa position initiale. La protection des glomes/paturon est maintenant fixée dans la partie arrière du sabot.

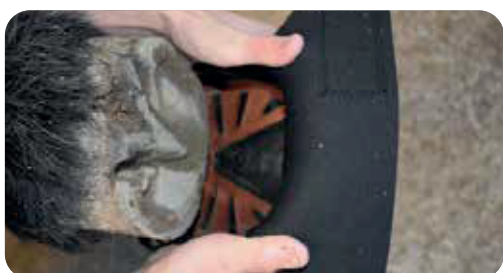**6**

Pour enfiler le Swiss Galoppers avec une protection du paturon, rabattez légèrement cette dernière vers l'arrière pour faciliter l'entrée. Pour les chevaux avec beaucoup de fanons, arrangez les poils pour qu'ils se placent bien. Ensuite, fermez le velcro supérieur et appuyez fermement.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Astuces + Conseils

Bottes pour sabot SG / SG-L



Le « SG » convient à la plupart des formes de sabots. Pour les sabots plus longs, les glomes larges et les talons plus hauts, nous recommandons le « SG-L ». Tous nos « Boot Kits » comprennent une paire de bandes de fermeture, une paire de bandes de paturon et une paire de coussinets pour glomes. Le « SG-L Boot Kit » contient en plus deux rallonges différentes.

Coque des glomes



La coque des glomes doit être positionnée à environ 90° par rapport au sol et entourer complètement les glomes en hauteur. Si la coque des glomes du modèle standard est inclinée ou trop basse, essayez le "SG-L".



Ne soulevez la coque des glomes qu'en la tenant directement, sans tirer sur le rembourrage.



REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Astuces + Conseils

Bottes pour sabot SG / SG-L

Sangle du paturon



Fixez la sangle du paturon à l'endroit marqué.



Lors de l'enfilage, ne serrez pas encore complètement la sangle de fermeture, cela facilite l'installation.



Pour un ajustement optimal, il doit y avoir un espace d'un doigt entre la sangle du paturon et la jambe du cheval.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com



Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Astuces + Conseils


Bottes pour sabot SG / SG-L

Sangle de fermeture

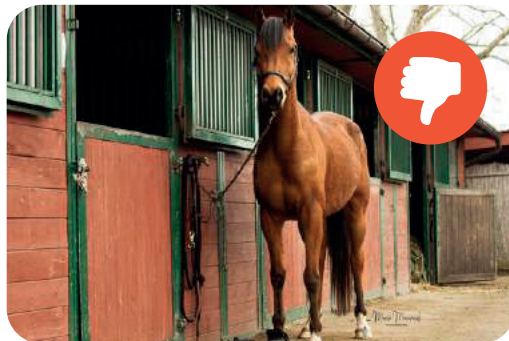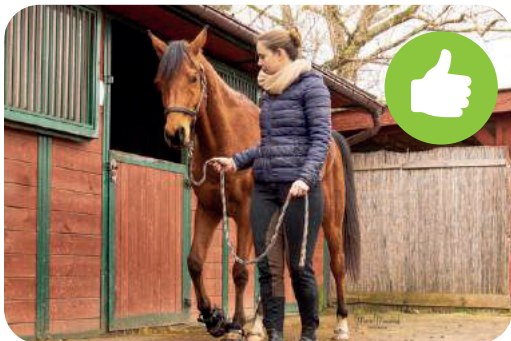

Après avoir mis la chaussure, faites quelques pas (idéalement en descente), puis resserrez la sangle de fermeture.

Position Metallschnalle

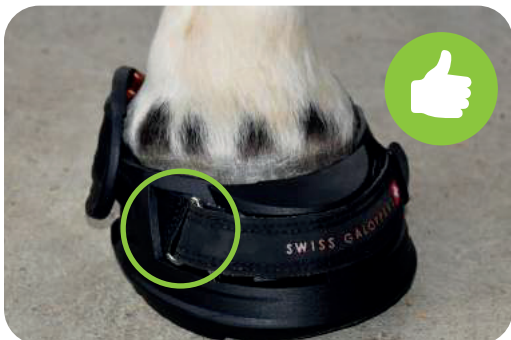

La boucle métallique doit être correctement positionnée sur le côté de la chaussure et ne doit pas être tirée vers l'avant.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Guide des tailles

Bottes pour sabot SG / SG-L / SG-X / SG-LX




Le « SG » convient à la plupart des formes de sabots. Pour les sabots plus longs, les glomes larges et les talons hauts, nous recommandons le « SG-L ». Les modèles « SG » et « SG-L » sont les bottes pour sabot idéales toute l'année. Pour les conditions hivernales extrêmes (neige et verglas), nous recommandons notre Winter Boot avec crampons intégrés (« SG-X » et « SG-LX »). Toutes les bottes sont disponibles en six tailles.

LARGEUR

LONGUEUR

HAUTEUR

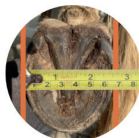

SG3	SG3-X	106 - 111	à → 135	à → 59
SG3-L	SG3-LX	106 - 111	de 136 →	de 60 →
SG4	SG4-X	112 - 118	à → 145	à → 64
SG4-L	SG4-LX	112 - 118	de 146 →	de 65 →
SG5	SG5-X	119 - 125	à → 155	à → 69
SG5-L	SG5-LX	119 - 125	de 156 →	de 70 →
SG6	SG6-X	126 - 132	à → 165	à → 74
SG6-L	SG6-LX	126 - 132	de 166 →	de 75 →
SG7	SG7-X	133 - 140	à → 175	à → 79
SG7-L	SG7-LX	133 - 140	de 176 →	de 80 →
SG8	SG8-X	141 - 151	à → 185	à → 84
SG8-L	SG8-LX	141 - 151	de 186 →	de 85 →



Légende des variantes

SG3 - SG8	= SG
SG3-X - SG8-X	= SG avec Spikes
SG3-L - SG8-L	= SG-L
SG3-LX - SG8-LX	= SG-L avec Spikes

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Guide des tailles

Bottes pour sabot SG / SG-L / SG-X / SG-LX



Attention : Assurez-vous de maintenir le mètre ruban à un angle de 90°. L'image montre expressément comment ne pas le faire :-). Un mètre ruban incliné peut fausser le résultat.

Mesurer les sabots des chevaux

Largeur



Lors de la mesure de la largeur, veillez à mesurer l'endroit le plus large du sabot.

Longueur



Lors de la mesure de la longueur, mesurez du bout de la pince jusqu'à l'alignement des glomes.

Hauteur



Lors de la mesure de la hauteur des glomes, mesurez du sol jusqu'à l'alignement du point le plus bas du pli du paturon.

W

La largeur du sabot détermine la taille des hipposandales (3-8).

L

La longueur du sabot par rapport à la largeur détermine le SG ou le SG-L.

H

Si la hauteur des glomes dépasse un certain seuil, le SG-L est nécessaire.



Un ajustement optimal des hipposandales nécessite un entretien régulier du sabot. Nous recommandons un intervalle de parage d'au plus 6 à 8 semaines, en fonction de la croissance individuelle du sabot.

REMARQUES IMPORTANTES

Pour garantir un ajustement optimal, les sabots doivent être mesurés au plus tard 14 jours après le dernier parage.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com





Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider !

Scannez le QR code pour accéder à des conseils, guides, tutoriels et questions fréquemment posées.



i REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com

